

## GEBRAUCHSANWEISUNG easystem<sup>®</sup>-Vorfußprothese für Patienten

Stand 01/18

### Anziehen ([siehe Videos](#))

- Den trockenen Stumpf mit wenig Lotion LPS-90 oder ähnlichem eincremen.
- Die Prothese wie einen Schuh anziehen und ggf. Schnürung festbinden.
- Wir empfehlen das Tragen eines Strumpfes (KEINEN Wollstrumpf).
- Im Laufe des Tages soll die easystem<sup>®</sup> immer wieder kurz ausgezogen werden, damit der Stumpf ablüften kann.

### Ausziehen ([siehe Videos](#))

- Schnürung öffnen
- Ferse der Prothese kräftig nach unten abziehen
- Bei der Vakuum-Ausführung mit einem gerundeten Schuhlöffel (ohne scharfe Kanten) einen Lufteintritt herstellen; die Prothese dann einfach wie einen Schuh ausziehen

### Pflegeanleitung

- Stumpfbettung täglich mit Seifenwasser reinigen und anschließend mit klarem Wasser (max. 40° C warm) gut nachspülen. Durch Schwitzen entstehen Salze auf der Haut, die Hautirritationen verursachen können.
- Stumpf täglich abends mit Pflegelotion (LPS-90) eincremen.
- Verschmutzte Stellen an der Prothese mit Reiniger (LPS-95) säubern. (keine Hausputzmittel verwenden!!)

### Warnhinweise

- Nach Benutzung in Salzwasser und in sandiger Umgebung gründlich mit klarem lauwarmen Wasser spülen.
- Prothese nicht über 90° C erhitzen – Material kann beschädigt werden (z.B. durch Sonneneinstrahlung)
- Kontakt mit Tinte und Druckerschwärze (Zeitungen etc.) vermeiden!!
- Prothese nicht beschleifen!!