

ANLEITUNG Maßnahme easystem[®]-Vorfußprothese Stand 01/18

Maßnahme

- Die zusätzliche Maßnahme dient Ihrer Sicherheit bei der späteren Modellierung
- Die Maße sollen mit leichtem Zug gemessen werden
- Nehmen Sie zusätzlich die Weiten-Maße aller knöchernen Strukturen

Empfohlene Mess-Punkte (siehe Skizze)

1. Ballen (falls vorhanden, sonst distales Stumpfende) (**Messpunkt 1**)
2. Ballen-Weite (falls vorhanden)
3. Taille (Maß an der dünnsten Stelle direkt proximal des Ballens, falls vorhanden)
4. Fußrücken (an der Position des Sustentaculum tali, falls vorhanden)
5. Fersenmaß (schräges Maß Ferse – Fußrücken) (**Messpunkt 2**)
6. Knöchelmaß (**Messpunkt 3 Skizze**)
7. Knöchelweite
8. Abschlußmaß (entspricht dem „B“-Maß) (**Messpunkt 4**)
9. Ggf. Höhenmaß und Umfang bei Stiefelausführung (über 15 cm)
10. Calcaneus Weite
11. Sup-Calcaneus Weite
12. Lotlinien auf das Gipsmodell übertragen

